

# GC GRADIA DIRECT F10

Światłoutwardzalny, płynny kompozyt hybrydowy

Łatwa w użyciu, płynna żywica  
do podścielania bezpośrednich  
wypełnień kompozytowych



**GC**  
FIRST IS QUALITY

# GC GRADIA DIRECT Flo

Światłoutwardzalny, płynny kompozyt hybrydowy

Kompozyt podścielający pierwszego wyboru pod wypełnienia GC GRADIA DIRECT i nie tylko...



GC GRADIA DIRECT Flo - płynny, mikrohybrydowy kompozyt jest częścią nowej rodziny produktów GC utworzonej przez system łączący GC UniFil Bond i materiały do wypełnień GC GRADIA DIRECT.

Wiele płynnych kompozytów dostępnych na rynku polecanych jest jako materiały uniwersalne. Jednak podczas stosowania tych produktów w praktyce klinicznej pojawiają się problemy albo z niewystarczającą konsystencją albo nieodpowiednimi do danych wskazań parametrami technicznymi.



GC GRADIA DIRECT Flo ze względu na specjalnie dostosowane właściwości fizyczne i konsystencję polecana jest

jako podścielenie pod wypełnienia kompozytowe takie jak np. GC GRADIA DIRECT. Ponadto nadaje się idealnie do wypełnień bardzo małych ubytków oraz do korekty bardzo małych nieregularności w kształcie zęba.

Formuła GC GRADIA DIRECT Flo umożliwia łatwy sposób użycia, a strzykawka zapewnia bardzo precyzyjne podawanie materiału.


## Wskazania

Płynna, nieklejąca się i doskonale dopasowująca się do ścian ubytku konsystencja sprawia, że GC GRADIA DIRECT Flo jest szczególnie przystosowana do:

- wyścielenia wnętrza ubytku pod bezpośrednie wypełnienia kompozytowe takie jak np. z GC GRADIA DIRECT
- wypełnienia tunelowego
- wypełnienia bardzo małych ubytków
- korekty małych nieregularności kształtu zęba
- naprawy uszkodzonych wypełnień kompozytowych

## Łatwy w użyciu

Niektóre płynne kompozyty są zbyt lejące albo zbyt lepkie. Konsystencja GC GRADIA DIRECT Flo powoduje, że materiał jest optymalnie płynny i jednocześnie nie klei się. Nałożony, szybko wypełnia wnętrze ubytku, lecz nie ścieka.

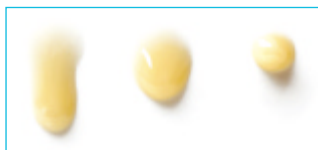

Żywica zbyt płynna      Żywica właściwa konsystencją      Żywica zbyt gęsta

## Łatwy w aplikacji

Strzykawki używane do GC GRADIA DIRECT Flo posiadają okrągły uchwyty umożliwiające manipulację we wszystkich kierunkach. Ponadto dostępne są dwa rodzaje zakrzywionych końcówek: giętke końcówki metalowe w kształcie igły i plastikowe dla dzieci lub pacjentów obawiających się igieł.

## Utwardzany światłem i widoczny na zdjęciach Rtg

**Element pełnego systemu kompozytowego do wypełnień**  
GC GRADIA DIRECT Flo jest integralną częścią naszego nowego systemu do bezpośrednich wypełnień, wspólnie z kompozytem GC GRADIA DIRECT i systemem łączącym GC UniFil Bond.

## Opakowania

**Odcień:** A3

**Uzupełnienie:**

2 x 1.5 g / 0.80 ml w strzykawkach, 4 metalowe końcówki i 2 osłony do ochrony przed światłem

## Aksesoria:

GRADIA DIRECT Flo:  
kończówki metalowe, 20 szt.  
kończówki plastikowe, 20 szt.

GC EUROPE N.V.  
Head Office  
Interleuvenlaan 13  
3001 Leuven - Belgium  
Tel. +32.16.39.80.50  
Fax. +32.16.40.02.14  
E-mail: info@gceurope.com  
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO - Poland  
Ul. Królowej Jadwigi 325B  
PL - 30-234 Kraków  
Tel. +48.12.425.14.74  
Fax. +48.12.625.28.60  
E-mail: poland@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

**GC**  
FIRST IS QUALITY